


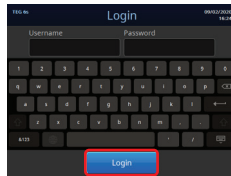
## Inicio

Encienda el dispositivo




Interruptor de encendido en el panel posterior. El analizador completará automáticamente la autocomprobación durante el encendido

Introduzca el **Usuario**, toque la casilla **Contraseña** o  e introduzca la contraseña. Después, toque **Iniciar sesión**





Error en el inicio de sesión: toque **Cerrar** para intentarlo de nuevo

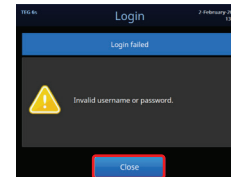


## Ejecución del ensayo del paciente


1. Seleccione **Prueba nueva**

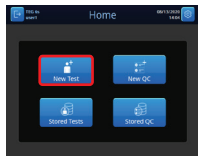

2. **Seleccione el paciente** de la lista al tocarlo o  para un nuevo paciente

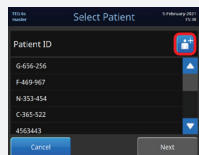

use las flechas para desplazarse

Escanee  o introduzca los datos del paciente. Después, toque **Confirmar**



datos del paciente

Aparece la pantalla **Confirmación de los datos del paciente** (si está conectado con TEG Manager<sup>®</sup> & LIS)



**Confirmar o Rechazar**

3. Seleccione la tarjeta necesaria



caja etiqueta



Tubo con citrato  
Tipo de muestra requerida



caja etiqueta




Tubo de heparina  
Tipo de muestra requerida

Abra la bolsa de la tarjeta




- Las tarjetas pueden utilizarse inmediatamente después de sacarlas del refrigerador
- Si se produce un error, retire la tarjeta y frote el código de barras para eliminar la condensación. Espere un minuto para que se caliente y vuelva a repetir el ensayo

4. Inserte la tarjeta

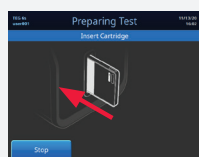


- Código de barras a la izquierda tal como se indica
- El LED de la ranura de tarjetas parpadea hasta que se inserta

5. Verifique la tarjeta y el tipo de muestra

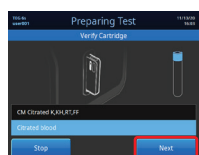

- Tarjeta de CM, K, KH, RT, FF citratados
- Sangre citratada
- Toque **Siguiente** para continuar

6. Introduzca **información del ensayo** opcional

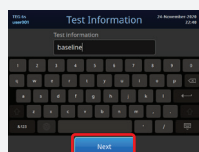

- Si no dese añadir texto, se puede dejar en blanco
- Toque **Siguiente** para continuar

7. Cargue la muestra



- Asegúrese de que la muestra de sangre sea correcta
- Invierta suavemente la muestra para que se mezcle bien

Dispense la muestra



hasta llegar a la flecha de indicador superior


Después, toque **Iniciar prueba**



inicio del ensayo

## Visualizar resultados


### Pantalla de resultados

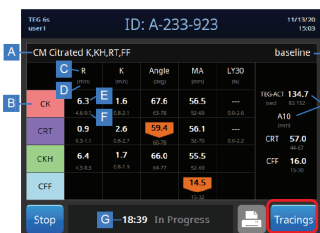

- A - nombre de la tarjeta
- B - nombre del ensayo
- C - parámetro
- D - unidades
- E - resultado
- F - intervalo de referencia
- G - temporizador de ensayo
- H - información del ensayo
- I - parámetros adicionales


- Los resultados sustituirán las líneas discontinuas cuando finalicen
- Los resultados pueden visualizarse gráficamente, seleccione **Trazados**

### Registros de grupos

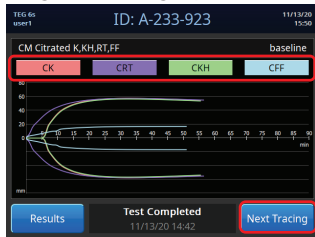


- Para acceder a registros individuales:
- Toque una clave en la leyenda o en el ciclo.
- Seleccione **Siguiente trazado**

### Registros individuales

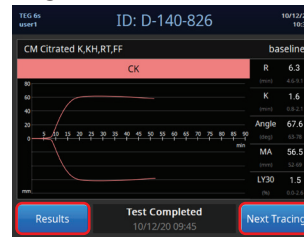


- Toque **Siguiente trazado** para explorar los registros
- Toque **Resultados** para volver a los resultados numéricos


## Finalización del ensayo

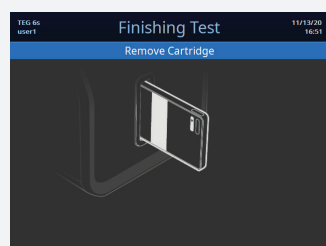

- El ensayo se detiene automáticamente cuando todos los parámetros se finalizan
- **Retire la tarjeta** cuando se le indique, el LED de la ranura de la tarjeta también parpadeará

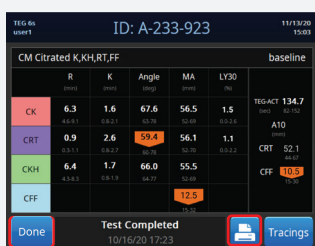

- El botón **Detener** se ha cambiado por **Listo**
- El botón **Imprimir** se activa
- Toque **Listo** para volver a la pantalla de inicio

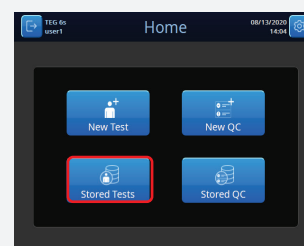

- Toque **Pruebas almacenadas** para ver los ensayos completados

## Iconos

Los iconos de la parte superior de la pantalla indican el estado del analizador.



Indica QC vencido



Guardar los datos tras finalizar el ensayo



Usuario remoto que ha iniciado sesión en la red



Evaluado por usuario remoto, bloqueado



Se están recopilando los datos, preparación de la muestra

Los iconos del menú Ensayos almacenados indican el estado del resultado analítico



Ensayo completado por propia finalización



Error en el ensayo o tiempo de espera agotado



Ensayo finalizado manualmente

## Resolución de problemas

Junto con todos los mensajes de error o alerta se emite un tono acústico junto con la descripción, el número y el mensaje



Error



Error crítico



Advertencia

- Anote la descripción y el número del error, siga las indicaciones y
- póngase en contacto con Haemonetics o el representante local si el problema persiste

## Mantenimiento



- Limpie y desinfecte todas las superficies externas semanalmente o con mayor frecuencia, según sea necesario
- Utilizar una solución con alcohol isopropílico al 70-95% o toallitas desechables germicidas de uso común
- Consulte el protocolo institucional
- En caso de duda, consúltelo con Haemonetics

Para consultar una lista de centros e información de contacto de las oficinas a nivel mundial, visite [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations)

© 2016, 2021 Haemonetics Corporation. Haemonetics y TEG son marcas comerciales registradas de Haemonetics Corporation en los EE. UU., en otros países o en ambos. 02.2021 EE. UU. TRN-QRG-100065-IE(AC)