


- 1** Enchufe el conector principal del cable de alimentación extraíble en un **interruptor diferencial de circuito exclusivo**. Encaje por completo el conector del dispositivo (C-19) del cable de alimentación en el conector hembra de alimentación de la parte trasera del infusor rápido The Belmont® RI-2. Si hay presente un protector contra humedad, asegúrese de que éste esté sobre el conector del dispositivo y pegado a la parte trasera de la máquina.



Apriete todas las conexiones y encaje la cámara del reservorio en el soporte.

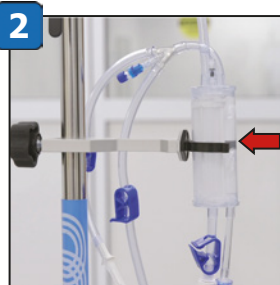


Cargue el anillo intercambiador de calor con la flecha roja apuntando hacia arriba.



Coloque la cámara de presión en el hueco destinado a la misma y encaje la línea de infusión en el detector de aire.




Coloque la línea de infusión a la izquierda del clamp negro y la línea de recirculación más delgada a la derecha.

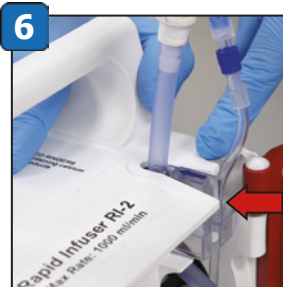


Coloque firmemente el bloque de encavamiento en la parte superior del estante con la flecha azul apuntando hacia adentro.



Coloque el tubo azul más grande en la ranura de la izquierda y el tubo más pequeño a la derecha y cerrar la puerta con el pestillo de bloqueo.

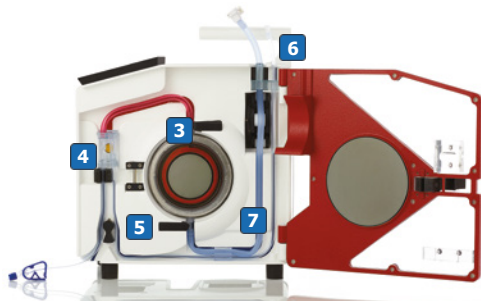

Caudal máximo alcanzable a 300 mmHg⁺

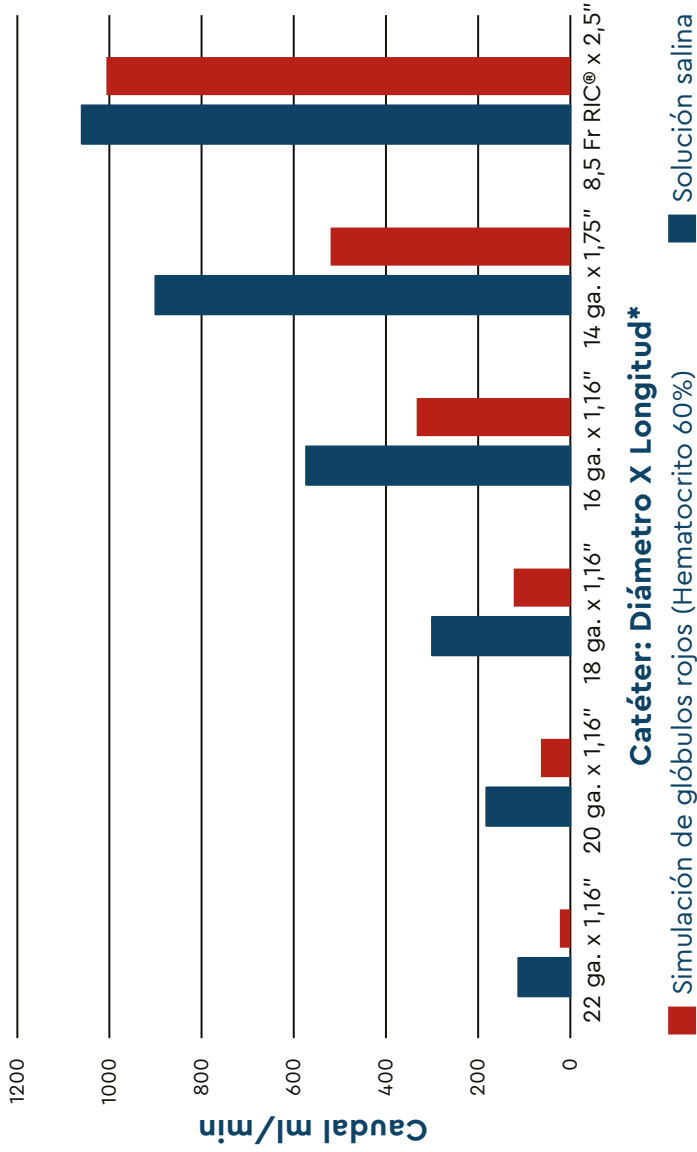

Todos los catéteres son de material plástico
⁺Datos de archivo de Belmont

Solución	Descripción	¿Compatible?
Sangre total anticoagulada que se procesa y se lava a través de un dispositivo recuperador de células (cell saver)		SI
FFP	Plasma fresco congelado	SI
RBCs	Glóbulos rojos	SI
NS	NaCl al 0,9 %	SI
Albumina 5 %		SI
Hidroxietil almidon (HES)	Hetalmidón en solución salina al 0,9 %	SI
Normosol	Electrolitos en agua	SI
Plasma-Lyte A		SI
Soluciones de bicarbonato sódico		NO
Solución salina normal ½	NaCl al 0,45 %	NO
Solución salina normal al 3%	NaCl al 3 %	NO
Plaquetas	No debe diluirse, se pega al tubo	NO
Crioprecipitado	No debe diluirse	NO
Soluciones que contengan calcio	Ca	NO
Solución de Ringer lactato	K, Na, Cl, Ca, Lactato	NO
Solución de Ringer	K, Na, Cl, Ca, Lactato	NO
Solución de Hartmann	K, Na, Cl, Ca, Lactato	NO
Hextend	Hidroxietilalmidón en Ringer lactato	NO
Aminoácidos al 8%		NO
10% de intralípidos		NO
20% de intralípidos		NO
D5W	Dextrosa al 5 % en agua	NO
D10W	Dextrosa al 10 % en agua	NO
D20W	Dextrosa al 20 % en agua	NO
D50W	Dextrosa al 50 % en agua	NO
Solución salina normal ½ D5	Dextrosa al 5 % NaCl al 0,2 %	NO
Solución salina normal ½ D5	Dextrosa al 5 % NaCl al 0,45 %	NO
D5NS	Dextrosa al 5 % NaCl al 0,9 %	NO
D10NS	Dextrosa al 10 % NaCl al 0,9 %	NO
Dextrano al 10 % en Dextrosa al 5 %		NO
10 % de dextrano 40 en 0,9 % NS		NO
5 % de alcohol en 5 % de Dextrosa		NO
D5 LR	5 % Dextrosa en Ringer Lactato	NO
D10 LR	10 % Dextrosa en Ringer Lactato	NO
Glucosa		NO

Advertencia de lactato Ringer



NO mezcle lactato Ringer u otras soluciones que contengan **calcio** con hemoderivados citrados.

La mezcla de Lactato Ringer u otras soluciones que contengan calcio con hemoderivados citrados comprometerá los anticoagulantes en la sangre, que podría coagularse bloqueando el flujo y causar un problema de exceso de temperatura o sobrecalentamiento.



CE 1434

Ferrer Farma S.A.

Avda Diagonal 549, 5ª Planta · 08029 Barcelona · Tel.: (+34) 93 600 37 72 · Fax: (+34) 93 490 70 78
E-mail: ferrerfarma@ferrergrupo.com

Servicio Técnico

C/ Joan XXIII, 10 · 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona · Tel.: (+34) 93 509 32 74

Belmont Medical Technologies

780 Boston Road · Billerica, MA 01821 · Tel.: 978.663.0212 · Fax: 978.663.0214 · belmontmedtech.com

Technical Support

US 1.855.397.4547 · WORLDWIDE +1 978.663.0212 · E-mail: techsupport@belmontmedtech.com

Belmont RI-2 cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios.

Material dirigido exclusivamente a profesional sanitario.